

Komfort und Sicherheit

DIE NEUE FFP2-NANOMASKE



ab nur
1,49 €



FFP2-zertifiziert



Nanofaser-Technologie: optimale Filtration, Haltbarkeit und Atmungsaktivität



Leichter als ein Blatt Papier



Super Tragekomfort durch elastische Bänder und verstellbare Nasenklammern

FFP2-Nanomaske
TELOGS-ARTIKEL-NR: 20340

**Lieferung in
nur 5 Tagen!**

Abnahmemenge	Verpackungseinheit	Preis/Stück
Ab 50 Stück	10 Stück	2,93 €
Ab 100 Stück	10 Stück	2,76 €
600 Stück	Karton á 600 Stück	1,95 €
1.200 Stück	Karton á 600 Stück	1,89 €
Ab 1.800 Stück	Karton á 600 Stück	1,69 €
Ab 10.200 Stück	Karton á 600 Stück	1,49 €

Alle Preise zzgl. MwSt.

**Kostenfreie Lieferung –
Jetzt bestellen!**




ersatzteilservice@telogs.de



0641/944649-70

FFP2 Maske


AirQueen Breeze

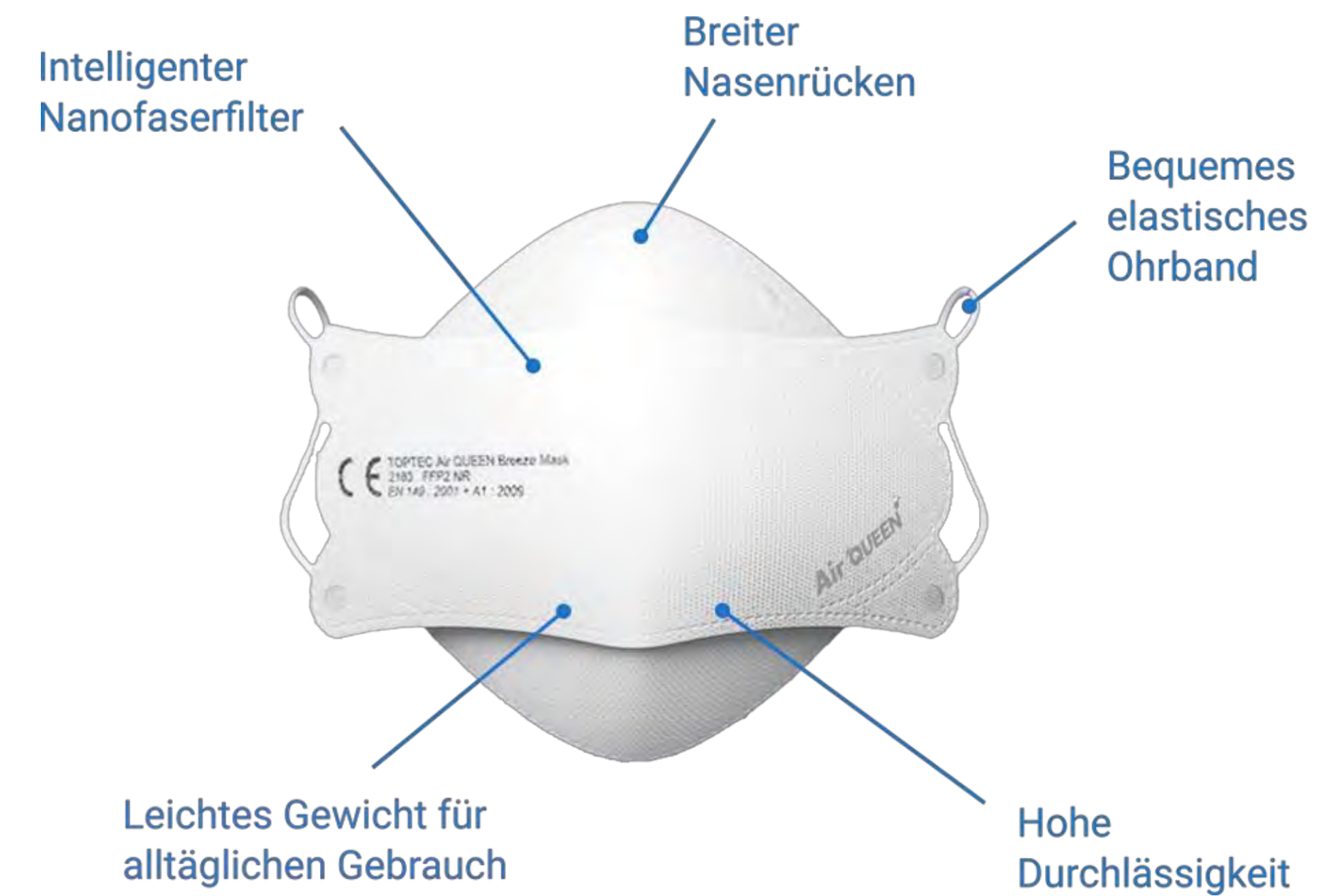



Detailinformation

FFP2 Maske AirQueen Breeze

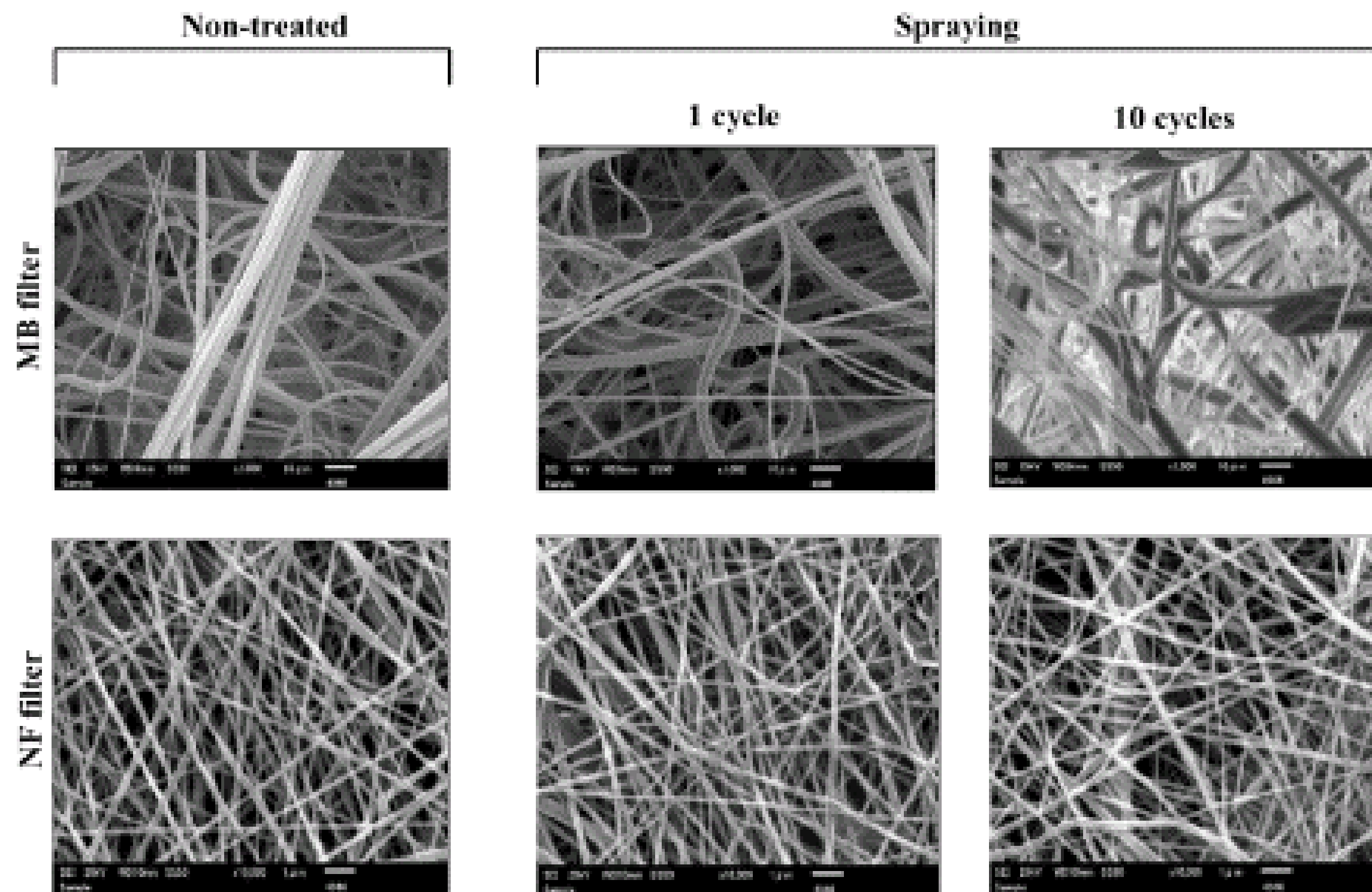

- Elektrostatisch aufgeladen
- **Nicht** elektrostatisch aufgeladen

Detailinformation

FFP2 Maske AirQueen Breeze



- Sterile, alubedampfte Verpackung
- Dadurch längere Haltbarkeit



Detailinformation

FFP2 Maske AirQueen Breeze

- Leichtes Gewicht 3,71 g (herkömmliche FFP2 ca. 6,25 g)
- Synthetischer Nanofilter mit langzeitstabilem Gewebe
- Standardmasken (meltblowen Masken) haben einen bis zu 100% höheren Atemwiderstand
- Längere Tragemöglichkeit
- Dadurch niedriger Durchschnittspreis
- Bis zu 10x weniger Müll (Nachhaltigkeit)
- Perfekt umzusetzender Arbeitsschutz mit leicht zu atmender AirQueen Breeze



Anleitung zur Reinigung FFP2 Maske AirQueen Breeze

Die AirQueen Nanomaske wird mit einem High-Tech Filtermaterial hergestellt. Dieses Filtermaterial unterscheidet sich grundlegend von den herkömmlichen Masken. Die Filtereffizienz bleibt sogar über eine lange Nutzungsdauer von bis zu 36 Stunden stabil. Durch die längere mögliche Nutzungsdauer ist es notwendig diese Maske regelmäßig zu desinfizieren.

Achtung: Die Desinfektion sollten Sie ausschließlich mit mindestens 75 % Ethanol Alkohol durchführen.

- **Sprühdesinfektion**
 - 1) Nehmen Sie die Maske am Ohrgummi in die Hand.
 - 2) Sprühen Sie die Maske von beiden Seiten ausgiebig ein, bis sämtliche Oberflächen der Maske satt bedeckt sind.
 - 3) Hängen Sie die Maske für 1,5 Stunden zum Trocknen auf.
 - 4) Ist die Maske trocken, kann sie wieder verwendet werden.
- **Desinfektionsbad**
 - 1) Füllen Sie eine Schüssel mit dem Desinfektionsmittel.
 - 2) Tauchen Sie die Maske mit beiden Seiten so ein, dass diese voll getränkt werden.
 - 3) Hängen Sie die Maske anschließend 3 Stunden zum Trocknen auf.
 - 4) Ist die Maske trocken, kann sie wieder verwendet werden.
 - Die AirQueen Nanomaske kann bis zu 10 x desinfiziert werden ohne, dass sie an Filterleistung verliert.